

Waarschuwing • Gehoorbeschermers zijn bedoeld om de drager te beschermen tegen gevaarlijke geluidsniveaus. Gehoorbeschermers dienen bij blootstelling aan harde geluiden zonder enige onderbreking te worden gedragen. • De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juiste keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van maatwerk. • Producten moeten altijd worden geplaatst, afgesteld en onderhouden in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Indien gebruiksaanwijzingen niet worden opgevolgd, kan Sounds Perfect B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. • Controleer altijd vóór gebruik of het maatwerk schoon is en geen defecten vertoont. Neem bij twijfel contact op met de leverancier van het maatwerk. • Bewaar het maatwerk altijd droog en donker in een afsluitbare verpakking. • Aanbevolen bewaartemperatuur is tussen de 10°C en 40°C • Verstikkingsgevaar – Houd het product uit de buurt van kinderen. Dit product is van kleine omvang, en bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Bewaar maatwerk in de meegeleverde verpakking. • De oordopjes, indien voorzien van een nekkoord, mogen niet worden gebruikt in situaties waar het risico bestaat dat het koord tijdens het gebruik verstrikt kan raken. • De oordopjes, indien voorzien van een nekkoord, mogen niet uit het oor worden verwijderd door aan het koord te trekken. • Neem het maatwerk langzaam uit om de afdichting van de gehoorgang geleidelijk te verbreken; Plotselinge of snelle verwijdering kan leiden tot letsel. • Plaats geen voorwerpen in het filter; dit kan het filter beschadigen. • Producten mogen niet worden gewijzigd of bewerkt, omdat dit de functionaliteit van het product kan beïnvloeden. • Sounds Perfect B.V. adviseert gehoorbeschermers bij eerste ingebruikname, en met een interval van 12 maanden, te lektesten en na maximaal 4 jaar te vernieuwen.

Garantie • Garantieclaims verlopen via het verkoopkanaal waar het product is aangeschaft. Garantievoorwaarden gelden voor de partij waar Sounds Perfect B.V. het maatwerk aan uitlevert. Benoemde termijnen gelden vanaf de pakkondatum van het betreffende product. De voorwaarden kan alleen van worden afgeweken wanneer specifiek en op voorhand anders is vermeldt. • Tot 3 maanden na uitleverdatum: De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van verzending, van maatwerk met tekortkomingen bij de productie omtrent de pasvorm, worden door Sounds Perfect B.V. vergoed. • Tot 12 maanden na uitleverdatum: De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van verzending, van maatwerk met tekortkomingen bij de productie omtrent het materiaal, worden door Sounds Perfect B.V. vergoed. • Voor het claimen van garantie dienen producten altijd fysiek en inclusief aankoopbewijs aan Sounds Perfect B.V. te worden geretourneerd. Sounds Perfect B.V. behoudt zich recht te oordelen of de indiener recht heeft op garantie. • Bij het moedwillig aanpassen, bewerken of wijzigen van het product komt de garantie per direct te vervallen. • Garantie kan niet worden verleend op producten die gebreken vertonen als gevolg van reguliere slijtage, verbruik of onjuist gebruik.

NOIZEZZ is onderdeel van Sounds Perfect B.V.
Wijkmeerstraat 16, 2131 HA Hoofddorp

Versie: NZMAHA-202409NL
Datum: 09-2024



EN 352


Vervaardigd door Sounds Perfect B.V.

+31 (0) 23 554 40 10
info@noizezz.eu
www.noizezz.eu

noizezz®

Inbrengen van het maatwerk

Controleer altijd vóór gebruik of jouw maatwerk schoon is en geen defecten vertoont. 1. Het oordopje met de stipmarkering is voor je rechteroor. Markeringen op de oordop zijn links blauw, en rechts rood. LET OP: Wanneer bijv. een rechter-oordop rood is, is de markering wit i.p.v. rood. Bij links blauw idem. 2. Houd het dopje tussen duim en wijsvinger. De gravering wijst naar beneden. 3. Trek met je andere hand de oorschelp naar boven. 4. Plaats het maatwerk tegen de opening van je gehoorgang en draai met een roterende beweging het maatwerk in je gehoorgang. Kantel voor je linkeroor het maatwerk kloksgewijs en vice versa. 5. De buitenkant van het maatwerk loopt gelijk met het oor. 6. Het maatwerk zit goed als deze niet buiten de gehoorgang steekt.

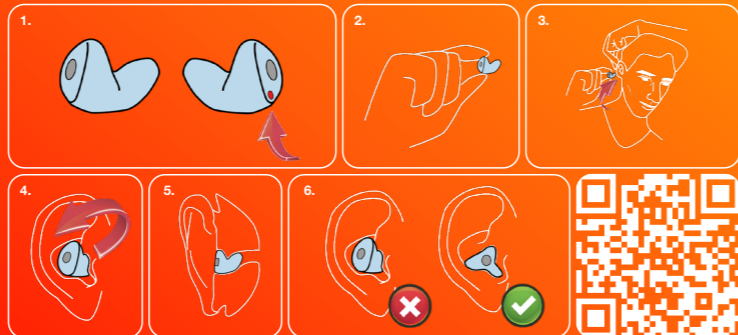

Uitlegvideo

Uitnemen van het maatwerk

Voor het uitnemen van het maatwerk doorloop je de stappen in tegengestelde richting en volgorde. Neem het maatwerk langzaam uit om de afdichting van de gehoorgang geleidelijk te verbreken; Plotselinge of snelle verwijdering kan leiden tot letsel.

Schoonmaak en onderhoud

Voor een optimale werking en levensduur van jouw NOIZEZZ maatwerk adviseren wij je om de oordopjes regelmatig schoon te maken. Spoel met water 37°C/99°F en milde zeep; een zachte doek of tissue. Gebruik maken van de NOIZEZZ Cleaning Spray of Cleaning Set, te koop bij een NOIZEZZ verkooppunt of in de webshop. Gebruik geen chemicaliën of alcoholhoudende middelen; deze kunnen een negatief effect hebben op de werking van het product.



noizezz

GEBRUIKSAANWIJZING | persoonlijke gehoorbescherming en specials



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900007844



FILTERS WISSELEN

Als je een zachte gehoorbeschermer met NOIZEZZ-filters hebt, kun je de filters verwisselen. Wanneer je een extra set van hetzelfde type filter (Performance of Music) in een andere kleur hebt aangeschaft, kun je je gehoorbeschermer aanpassen aan verschillende situaties. Let er wel op dat alleen filters van hetzelfde type verwisseld kunnen worden, omdat deze een andere vorm hebben.

Filters zijn altijd gemonteerd wanneer je NOIZEZZ-gehoorbeschermers voor het eerst ontvangt. Bekijk goed hoe en waar de filters zijn gemonteerd vóórdat je ze verwisselt, of gebruik de productafbeelding/afbeeldingen als referentie. Je kunt het filter aan de vlakke zijde uit de gehoorbeschermer drukken en een nieuw filter plaatsen. Lukt het niet, of laat je dit liever door ons doen? Geen probleem! NOIZEZZ staat altijd klaar om je te helpen je gehoor te beschermen!

AQUA Zwemdooppen



Karakteristieken van de AQUA zwemdooppen:

De zwemdooppen van NOIZEZZ kunnen worden gemaakt uit verschillende siliconen materialen, en er kan gekozen worden voor een drijvend materiaal. De zwemdooppen zijn vormgegeven om water buiten de gehoorgang te houden.

CUSTOM AQUA	Gem. Demping 30-35dB*
*Dempingswaarden zijn een aanname op basis van demping bij afsluiten van het gehoorkanaal.	
LET OP: De AQUA oordoppen zijn niet geschikt om mee te duiken, omdat de oordop de gehoorgang volledig afsluit en de oren niet geklaard kunnen worden.	

SOFT MF Gehoorbescherming

CE 1974 EN 352-2



Dempingskarakteristiek Music Filters:

De NOIZEZZ Music Filters zijn speciaal ontwikkeld om de geluidsbeleving intact te houden, terwijl je je gehoor beschermt. De filters hebben een 'vlakke demping'; De verhouding van de demping blijft over de gehele breedte van het geluidsspectrum ongeveer hetzelfde.

CUSTOM Soft MF - Extreme	Gem. Demping 18dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	23,5 24,0 22,7 22,3 22,3 17,2 18,6 37,7 20,4 18,2 19,9 20,9
Sf [dB]	5,3 4,5 3,4 3,2 2,6 2,7 2,5 5,0 2,0 2,1 2,1 2,3
APVf [dB]	18,2 19,5 19,3 19,1 19,7 14,5 16,1 32,7 18 16 18 19
CUSTOM Soft MF - Strong	Gem. Demping 16dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	21,3 21,9 20,9 19,9 19,9 14,1 21,6 24,3 18,4 16,2 17,5 18,3
Sf [dB]	4,2 3,8 2,8 3,2 3,0 4,3 3,0 4,8 2,7 3,4 2,6 2,0
APVf [dB]	17,1 18,1 18,1 16,7 16,9 9,8 18,6 19,5 16 13 15 16
CUSTOM Soft MF - Medium	Gem. Demping 15dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	17,9 17,6 15,8 15,6 13,3 16,3 19,7 22,0 16,8 16,4 14,4 14,8
Sf [dB]	3,9 2,9 2,3 3,2 3,0 4,0 2,5 4,1 2,0 2,0 2,3 2,1
APVf [dB]	14,0 14,7 13,5 12,4 10,3 12,3 17,2 17,9 15 14 12 13
CUSTOM Soft MF - Mild**	Gem. Demping 13dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	16,1 15,2 13,4 12,4 10,6 16,0 18,0 22,8 15,0 15,6 12,1 12,3
Sf [dB]	4,5 3,6 2,9 2,4 2,5 4,2 2,1 3,6 2,0 2,0 1,8 1,4
APVf [dB]	11,6 11,6 10,5 10,0 8,1 11,8 15,9 19,2 13 13 10 10

f [Hz] Frequentie in Hertz. H [dB] Gemiddelde demping in hoogfrequent geluidsspectrum (f > 2000). M [dB] Gemiddelde demping in middenfrequent geluidsspectrum (f > 500 - 2000). L [dB] Gemiddelde demping in laagfrequent geluidsspectrum (f < 500). MF [dB] Gemiddelde demping bij gegeven frequentie f in decibel. Sf [dB] Standaarddeviatie bij gegeven frequentie f in decibel. APVf [dB] Gemiddelde demping per frequentie f (Mf - Sf) in decibel. SNR [dB] Gemiddelde demping.

SLEEP Slaapdooppen



Karakteristieken van de SLEEP slaapdooppen:

De slaapdooppen van NOIZEZZ zijn gemaakt van een zacht siliconen materiaal. De slaapdooppen sluiten de opening van het gehoorkanaal af van omgevingsgeluid, en zijn vormgegeven om zo min mogelijk druk op de huid uit te oefenen.

CUSTOM SLEEP	Gem. Demping 30-35dB*
*Dempingswaarden zijn een aanname op basis van demping bij afsluiten van het gehoorkanaal.	
De SLEEP oordoppen sluiten het oor volledig af, maar houdt er rekening mee dat geluiden ook via de neus, mond en schedel hoorbaar zijn wanneer het volume hoog genoeg is.	

SOFT PF Gehoorbescherming

CE 1974 EN 352-2



Dempingskarakteristiek Performance Filters:

De NOIZEZZ Performance Filters zijn speciaal ontwikkeld om je omgeving goed te kunnen waarnemen, zonder je gehoor te beschadigen. De filters hebben een 'gekrumde demping'; Hoe hoger de frequentie zich in het geluidsspectrum bevindt, hoe hoger de demping.

CUSTOM Soft PF - Extreme	Gem. Demping 27dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	21,9 23,6 24,7 27,0 27,2 34,0 26,5 43,9 29,0 29,3 27,3 26,0
Sf [dB]	3,8 3,8 2,5 2,7 3,5 3,2 3,7 5,0 2,5 3,0 2,4 2,4
APVf [dB]	22,8 25,2 25,2 28,6 31,3 32,5 34,0 39,9 27 26 25 24
CUSTOM Soft PF - Strong	Gem. Demping 23dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	13,7 14,6 19,4 20,7 22,7 28,2 23,9 35,8 24,4 25,3 22,4 19,6
Sf [dB]	5,7 4,3 3,8 2,8 3,1 3,9 3,1 5,1 1,7 1,7 2,0 2,8
APVf [dB]	8,0 10,3 15,6 18,3 19,6 24,3 20,8 30,7 13 24 20 17
CUSTOM Soft PF - Medium	Gem. Demping 20dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	7,8 10,3 13,4 16,3 20,5 25,1 23,6 28,9 21,5 23,8 19,1 15,1
Sf [dB]	2,8 3,1 2,3 3,0 2,5 3,2 3,4 1,9 2,2 1,9 2,0
APVf [dB]	5,0 7,2 11,1 13,3 18,0 21,9 19,9 25,5 20 22 17 13
CUSTOM Soft PF - Mild	Gem. Demping 18dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	5,2 7,7 9,9 13,8 17,5 23,0 22,9 25,1 19,0 21,7 16,5 12,2
Sf [dB]	2,2 2,1 1,6 2,1 2,7 3,9 2,4 4,0 1,5 2,0 1,8 1,4
APVf [dB]	3,0 5,6 8,3 11,7 14,8 19,1 20,5 21,1 18 20 15 11

CUSTOM Soft MF, CUSTOM Soft PF en CUSTOM Hard PF zijn gehoorbeschermingsproducten die vallen onder de Europese verordening voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). De tests volgens EN 352-2:2020, de certificeringen volgens de verordening EU 2016/425 en de productiecontrole module D werd uitgevoerd door: PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany (NB No. 1974). Sounds Perfect B.V. verklaart dat de gehoorbescherming voldoet aan de

ACTIVE COM Communicatie



Karakteristieken van de ACTIVE COM:

De heavy-duty oortelefoon van NOIZEZZ. Vervaardigd uit siliconen materiaal met zeer hoge treksterkte; de pasvorm is niet alleen op maat gemaakt en comfortabel, maar ook zeer robuust. Steekt niet uit het oor en is goed onder een helm te dragen.

CUSTOM ACTIVE COM	Gem. Demping 30-35dB*
*Dempingswaarden zijn een aanname op basis van demping bij afsluiten van het gehoorkanaal.	
Type driver: Balanced Armature Impedantie: 50 Ohm Freq. bereik: 50 Hz - 15 kHz Sensitiviteit: 102 dB ± 3 dB @ 1 kHz Output: 126 dB bij 100 mVA Aansluiting: 3,5 mm jack, stereo	

HARD PF Gehoorbescherming

CE 1974 EN 352-2



Zachte of harde gehoorbeschermers:

De NOIZEZZ Performance Filters kunnen in harde of zachte materialen worden gemonteerd. Zacht materiaal biedt meer comfort, omdat het met de gehoorgang mee beweegt tijdens bv. praten of eten. Hard materiaal is duurzamer, en makkelijker schoon te houden.

CUSTOM Hard PF - Extreme	Gem. Demping 33dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	25,2 29,5 29,9 32,5 36,5 36,6 39,4 45,8 36,6 37,2 34,5 31,9
Sf [dB]	2,4 4,3 4,7 3,9 5,2 4,1 5,4 5,9 3,4 3,7 3,6 3,9
APVf [dB]	22,8 25,2 25,2 28,6 31,3 32,5 34,0 39,9 33 34 31 28
CUSTOM Hard PF - Strong	Gem. Demping 23dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	15,7 17,6 20,5 22,2 27,0 29,9 29,2 40,8 27,8 29,5 25,4 22,0
Sf [dB]	3,0 2,9 2,2 2,7 2,8 3,2 4,2 4,4 2,1 2,4 2,1 2,0
APVf [dB]	12,7 14,7 18,3 19,5 24,2 26,7 25,0 36,4 26 27 23 20
CUSTOM Hard PF - Medium	Gem. Demping 21dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	9,9 11,0 14,9 17,4 20,4 26,7 25,6 36,1 22,7 25,3 19,9 16,2
Sf [dB]	3,6 2,8 2,1 2,4 3,1 3,8 2,6 3,2 2,0 2,4 2,1 1,9
APVf [dB]	6,3 8,2 12,8 15,0 17,3 22,9 23,0 32,9 21 23 18 14
CUSTOM Hard PF - Mild	Gem. Demping 18dB
f [Hz]	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L
Mf [dB]	6,1 8,5 11,2 13,6 18,3 25,3 25,0 33,3 19,9 23,5 16,9 13,0
Sf [dB]	4,7 3,8 2,5 2,9 3,5 4,4 3,1 4,7 2,3 2,5 2,3 2,5
APVf [dB]	1,4 4,7 8,7 10,7 10,7 14,8 21,9 28,6 18 21 15 11

PBM verordening EU-2016/425. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden via de volgende link www.noizezz.eu/downloads. **CUSTOM Soft MF - Mild voldoet niet aan de minimum dempingseisen van EN352-2 en wordt daarom niet als gehoorbescherming aanschouwd. Dit product dient gebruikt te worden ten behoeve van comfort t.o.v. auditieve prikkelingen.